


Figura 10

Se, come in foto, le cinghie vengono agganciate non incrociate, è possibile effettuare una veloce igiene personale ed il cambio del pannolone.

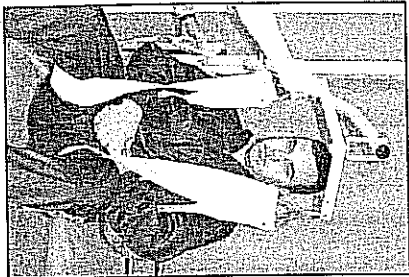

PULIZIA IMBRACATURE: Le fasce possono essere lavate a mano in acqua bollente con detersivo. Trattandosi di tela cotonata e anelli in ferro, non lavare in lavatrice, non avvicinare a fonti di calore e non stirare.

MANUTENZIONE: L'imbracatura non richiede particolari manutenzioni, tuttavia devono essere periodicamente controllate le sue parti in tela cotonata, gli anelli in ferro e i rivetti metallici. Ad un eventuale controllo non devono presentare segni di danneggiamento o usura.

NORME DI SICUREZZA:

- Accettarsi sempre che l'imbracatura sia posizionata correttamente in modo da garantire la massima comodità e sicurezza del paziente.
- Manovrare il sollevatore in modo da mettere un comodo aggancio degli anelli in ferro dell'imbracatura al bilancino, facendo attenzione di abbassarlo il più possibile senza comunque che questi entri in contatto con il capo del paziente.
- Alzare il paziente con una salita unica senza troppi strappi.
- Non usare l'imbracatura se questa presenta segni di danneggiamento.
- Usare l'imbracatura solo per il sollevamento ed il trasporto dei pazienti.
- Non manomettere o modificare alcuna parte dell'imbracatura.
- Controllare la cinghia del motore che non presenti danneggiamenti, pieghe anomale, o cuciture danneggiate.
- Il fornitore declina ogni responsabilità per danni provocati da un utilizzo dell'attrezzo in modo scorretto, improprio o non previsto nel seguente manuale.
- **FUNGO DI EMERGENZA:** in caso di necessità, sulla piantana esiste un pulsante rosso (fungo di emergenza) che, se premuto, toglie corrente immediatamente a tutto l'impianto, bloccandolo subito. Per riattivare questo pulsante basta girarlo in senso orario, di mezzo giro, in modo tale che questo fungo ripristini corrente al sollevatore.



MANUALE D'USO IMBRACATURA AMP

L'imbracatura **AMP** è composta da tre cinghie: due di misura uguale tra loro con all'estremità due triangoli in ferro, utili per imbragare le gambe del paziente. La terza cinghia, che all'estremità porta sempre due triangoli in ferro, è utile per il sollevamento della schiena.

Modalità di utilizzo: nelle seguenti pagine saranno illustrate le principali operazioni da seguire per imbragare correttamente il paziente.

PRO SENECTUTE SRL

Via Pientino, 30 - Levata di Curatone (MN)
Tel. 0376/290293 - Fax 0376/293245
Sito: www.pro-senectute.it
E-mail: pro-senectute@pro-senectute.it
P. IVA e C.F. 01889110209

PRODOTTO CONFORME



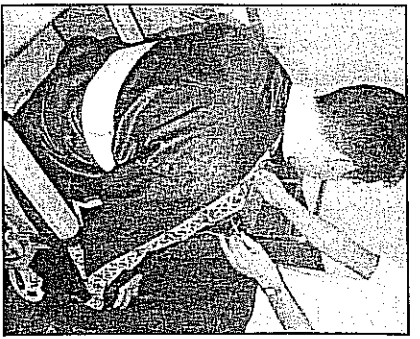


Figura 1

Come si vede nella figura, la cinghia viene posizionata dietro la schiena del paziente, sotto le scapole e ben aderente, facendo uscire le estremità da sotto le ascelle.



Figura 4

Sistemare la cinghia delle gambe lungo il fianco del paziente e quindi far passare l'estremità in ferro sotto la coscia.

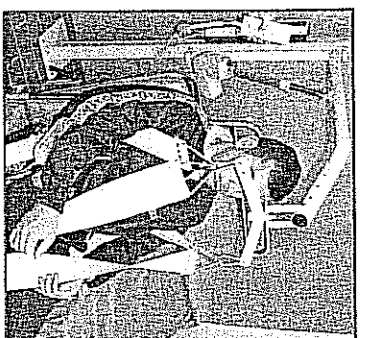


Figura 7

Aggianciare poi anche le cinghie delle gambe al bilanciino. Le cinghie delle gambe possono anche essere agganciate incrociate per permettere al paziente di stare più raccolto, intanto che viene posizionato sulla carrozzina.

Figura 2

Prendere una delle cinghie per le gambe e inserire l'asola in un anello della cinghia della schiena.

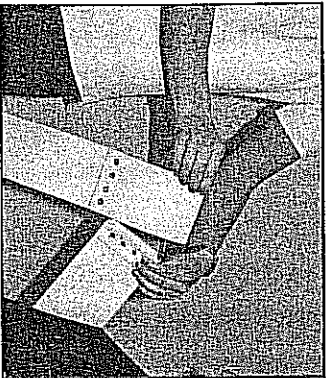


Figura 5

La cinghia deve essere fatta passare da esterno coscia a interno coscia, aderente il più possibile all'inguine.



Figura 8

L'utente imbragato correttamente può essere alzato dalla carrozzina e messo sul letto.

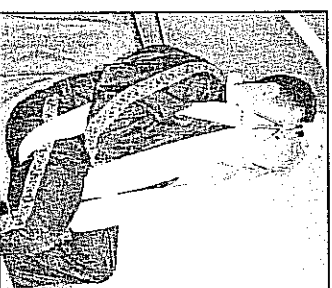


Figura 3

Una volta inserita, portare l'asola ben sotto l'ascella del paziente.



Figura 6

A questo punto si prende il bilanciino e si agganciano le cinghie delle spalle allo stesso.



Figura 9

Quando si solleva l'utente è estremamente importante non mollare mai il bilanciino.



NOTA BENE: tutte le operazioni devono essere effettuate da un'unica persona, al fine di non creare confusione.