


**HUMAN
CARE**

freedom to move

Imbragatura da toilette Plus 25080 Imbragatura da toilette in rete Plus 25085

9.05.2016
VOTIME 2

IMBRAGATURE REGALATE DALL'ASS.
3 A.

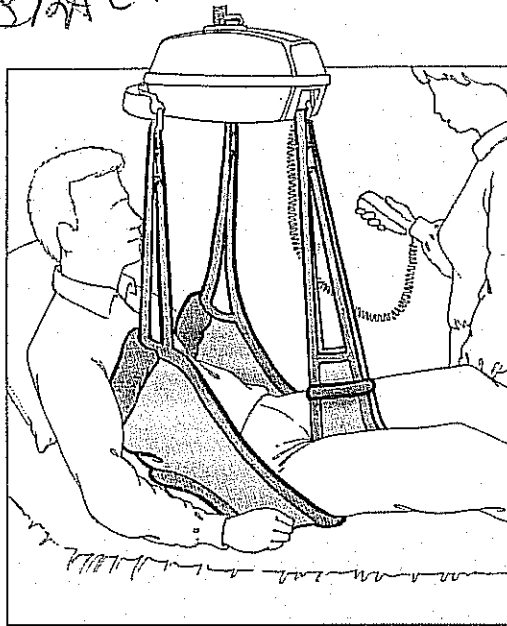

L'imbragatura da toilette Human Care Plus 25080 e Human Care Plus in rete 25085 sono prevalentemente impiegate per le visite alla toilette. Queste imbragature sono dotate di sezioni posteriori rinforzate e imbottitura sotto le braccia. 25080 e 25085 sono ottime anche per spostare le persone verso sedie a rotelle strette e sedute sagomate.

Le cinghie toraciche Human Care 25145/25146 sono disponibili come optional insieme a queste imbragature.

25080 e 25085 sono destinate alla sospensione su due o tre punti.


Importante!



Il sollevamento e la movimentazione di una persona implicano sempre un certo rischio. Leggere attentamente le istruzioni sia per la procedura che per l'attrezzatura di sollevamento. Accertarsi sempre di usare il dispositivo di sollevamento giusto per semplificare ogni procedura di sollevamento precisa. In qualità di infermieri/assistenti, voi siete responsabili della sicurezza della persona che riceve le vostre cure, pertanto dovete conoscere la capacità del paziente a gestire la situazione di sollevamento. In caso di dubbi, contattare il fornitore.

Sollevamento da posizione supina

1

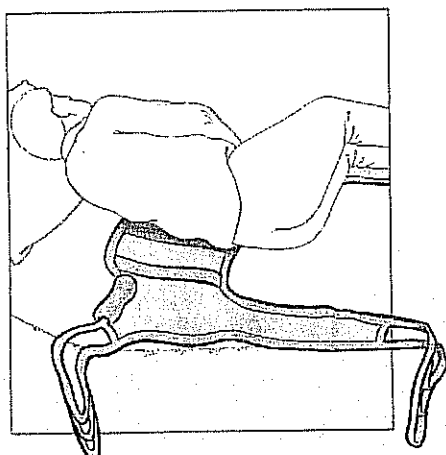


Coricare il paziente su un fianco. Posizionare il centro dell'imbragatura in linea con la colonna vertebrale. Fare attenzione all'etichetta sull'imbragatura (lato esterno in su).

Fare girare il paziente sull'altro lato e tirare fuori l'imbragatura. Posizionare il paziente sulla schiena.

Se il letto è regolabile in verticale, è preferibile sollevarlo in posizione reclinata.


2

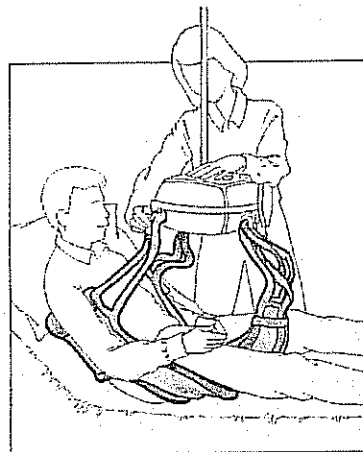

Estrarre le sezioni delle gambe tra le gambe del paziente. Se il paziente deve andare alla toilette, slacciare i bottoni dei pantaloni a questo punto. Abbassare il sollevatore a livello del ventre. Se si desidera, fare passare la sezione sinistra della gamba attraverso la fascia sulla parte esterna della sezione destra della gamba. Agganciare entrambe le fasce di sollevamento della sezione gambe sul gancio anteriore del sollevatore. Girare il sollevatore tutt'attorno e agganciare le fasce di sollevamento della sezione posteriore ai ganci posteriori del sollevatore. Con una mano, tenere il sollevatore lontano dalla testa del paziente mentre lo si alza sopra la testa.


Alternativa: l'imbragatura può anche essere usata con sospensione su due punti. In questo caso, la fascia sull'esterno della sezione destra per le gambe non viene utilizzata. Mentre le sezioni per le gambe sono incrociate.

3

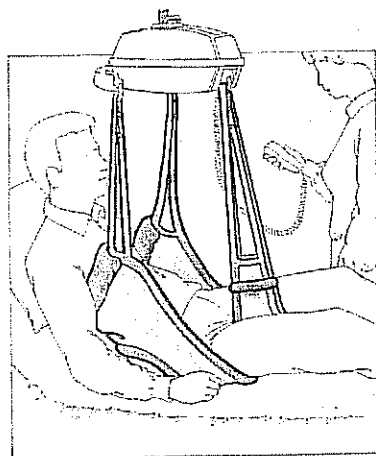

Rimanere in posizione e accertarsi che tutte le fasce di sollevamento siano correttamente distese e nella giusta posizione.

4

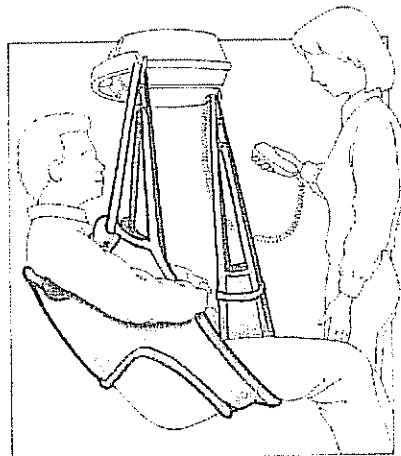

Riprendere il sollevamento. Se necessario, abbassare leggermente il letto. Sollevare leggermente le gambe del paziente quando lo si gira allontanandolo dal letto. Se si utilizza la toilette, abbassare i pantaloni il più possibile

mentre il paziente è ancora nell'imbragatura. Quindi abbassare il paziente sul sedile della toilette, abbassare il sollevatore fino alla pancia e sganciare le sezioni delle gambe (se il paziente è in grado di sedere senza sostegno, rimuovere l'imbragatura intera). Alzare il sollevatore al di sopra della testa del paziente. Abbassare completamente i pantaloni. Ora il paziente è in grado di sedere con il sostegno dell'imbragatura.